



Hyalufem

Gel Hidratante Intravaginal

ácido hialurônico

Gel hidratante intravaginal formulado com componentes de origem natural.

Hidratante e restaurador da umidade vaginal natural de longa duração

Apresentação:

Bisnaga contendo 24 g e 8 aplicadores de uso único.

USO TÓPICO VAGINAL USO ADULTO

Composição:

ácido hialurônico hidrolisado.....5 mg/dose
(água, goma xantana, carragena, propanodiol, caprilato de sorbitano, hialuronato de sódio, ácido benzóico, ácido lático, hidróxido de sódio).

Aplicador com corpo em polietileno e êmbolo em polipropileno, com limitador.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

COMO HYALUFEM FUNCIONA?

Hyalufem é um gel hidratante intravaginal de longa duração, não hormonal, livre de parabenos e livre de derivados de petróleo, desenvolvido para hidratar, além de restaurar a umidade vaginal natural. Hyalufem contém ácido hialurônico que atua diretamente na região desidratada proporcionando umidade e lubrificação.

Após a inserção do gel na vagina, o ácido hialurônico adere à parede vaginal, criando uma superfície hidratada. As propriedades de hidratação do gel são atribuídas às características do ácido hialurônico que libera as moléculas de água no tecido, aliviando assim o estado seco da vagina, sem irritar a mucosa. O ácido hialurônico permanece aderido até a descamação das células epiteliais, o que ocorre em até 3 dias. Durante esse período, ocorre a migração de água e eletrólitos para a vasculatura dérmica causando vasodilatação, o que aumenta o suprimento sanguíneo à mucosa vaginal e subsequentemente melhora, ainda mais, a hidratação tecidual da região.

QUEM PODE UTILIZAR HYALUFEM?

Hyalufem foi desenvolvido para as mulheres que sofrem de ressecamento vaginal.

O ressecamento vaginal ocorre quando a mucosa não mantém hidratação suficiente para o conforto íntimo, podendo causar coceira, infecção bacteriana ou fúngica e relações sexuais dolorosas. Esta condição pode ocorrer após o parto, durante tratamentos com quimioterapias, períodos de estresse e, principalmente, na menopausa.

QUAIS AS VANTAGENS DO USO DE HYALUFEM?

Hyalufem é um gel hidratante intravaginal.

Hyalufem não contém hormônios.

Hyalufem é livre de parabenos que podem causar alergias e irritações.

Hyalufem é livre de derivados do petróleo que podem dissolver preservativos e diafragmas.

Hyalufem permite que a relação sexual seja mais confortável, restaurando a umidade vaginal.

Hyalufem alivia os sintomas do ressecamento vaginal como: coceira, irritação e desconforto na relação sexual, ajudando a manter a umidade e a saúde vaginal.

POR QUANTO TEMPO DEVE-SE UTILIZAR HYALUFEM?

Dependendo da causa, a duração do ressecamento vaginal pode variar. Em caso de dúvida, converse com o seu médico.

HYALUFEM PODE SER UTILIZADO ANTES DA RELAÇÃO SEXUAL?

Sim. Porém, utilizando Hyalufem regularmente, não haverá a necessidade da aplicação para a prática sexual, pois a vagina estará hidratada.

HYALUFEM CAUSA CORRIMENTO?

Devido às suas propriedades mucoadesivas, Hyalufem tem uma probabilidade muito pequena de escorrer ou causar corrimento. Se ocorrer um pouco de secreção é apenas uma combinação de Hyalufem e de possíveis células mortas. Geralmente, quanto maior a secura vaginal inicial, maior é o número de células mortas que serão expelidas nas fases iniciais de uso. Isso melhorará com a continuidade das aplicações e, eventualmente, desaparecerá à medida que a umidade vaginal for recuperada. Se a secreção vaginal apresentar qualquer odor desagradável ou coloração diferente, pode ser evidência de uma infecção vaginal preexistente. Consulte seu médico para mais esclarecimentos.

QUAIS AS PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS PARA UTILIZAÇÃO DE HYALUFEM?

- Hyalufem é somente para uso vaginal.
- Utilizar sob supervisão médica.
- A utilização do Hyalufem com outros cremes vaginais deve ser orientada pelo seu médico.
- Não existem interações conhecidas com outros produtos / medicamentos.
- Não é recomendado o uso durante o período menstrual.
- Em caso de irritação suspenda o uso e se persistirem os

sintomas consulte o médico.

- Não utilizar após a data de vencimento indicada na embalagem e caso a embalagem esteja violada.

QUANDO NÃO DEVO USAR HYALUFEM?

Este produto é contraindicado em caso de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.



Informe ao seu médico ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do produto. Informe também a empresa através do seu Serviço de Atendimento ao Consumidor.

COMO DEVO USAR HYALUFEM?

Instruções de uso:

1. Separe um aplicador e retire a tampa da bisnaga.
2. Adapte o aplicador no bico da bisnaga, rosqueando-o lentamente.
3. Puxe o êmbolo até o limite estipulado e segure-o firmemente.
4. Aperte suavemente a base da bisnaga com os dedos, forçando a entrada do gel no aplicador.

5. Preencha o aplicador com o gel até o limite recomendado.
6. Retire o aplicador da bisnaga e feche-a novamente.
7. Introduza profundamente o aplicador que contém o produto na vagina, preferencialmente na posição deitada, elevando-se as pernas.
8. Transfira todo o conteúdo do aplicador para a vagina.
9. Após usar o aplicador, deve-se descartá-lo.

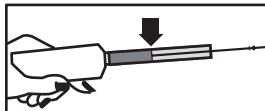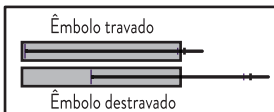

COMO SEI QUE ESTOU UTILIZANDO A QUANTIDADE CORRETA?

É recomendada uma única aplicação a cada 3 dias. Ou conforme orientação médica.

O aplicador descartável de Hyalufem possui um mecanismo que fornece a quantidade indicada para cada aplicação, 3 g de gel.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este produto, procure orientação do farmacêutico.

ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR HYALUFEM?

Cuidados de conservação:

Mantenha em temperatura ambiente. Proteger da luz e da umidade. Mantenha fora do alcance de crianças.

Prazo de validade

Número do lote, data de fabricação e prazo de validade – Vide cartucho.

Características

Gel semi-transparente levemente branco, opaco, com odor característico.

Não é tóxico se ingerido. Não tem gosto.

Antes de usar, observe o aspecto do produto. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Descarte:

Após o uso, descartar a embalagem vazia em local apropriado.

Reg. ANVISA 80225209001

Farmacêutica Responsável: Maryster Ferrari Picolin
CRF-SP: 27.877

Fabricado por: **HELianto FARMACêUTICA LTDA**

Av. José Abbas Casseb, 135 - São José do Rio Preto - SP
CEP 15092-606 - CNPJ 04.506.487/0001-30

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Comercializado e distribuído por:

Abbott Laboratórios do Brasil Ltda.

Rua Michigan, 735 - São Paulo - SP

CNPJ 56.998.701/0001-16

Hyalufem é uma marca licenciada pelo Herbarium Laboratório Botânico.

ABBOTT CENTER

Central de Relacionamento com o Cliente
0800 703 1050 www.abbottbrasil.com.br

500004685/00 - AR00 - PHC.126 - 105x170mm

FO 01

Abbott

