

Kelo-cote®

Gel de silicone para o tratamento e prevenção de cicatrizes

O que é Kelo-cote®?

Kelo-cote® é um gel de silicone transparente e autossicante que mantém o equilíbrio hídrico da pele, facilitando a regeneração de cicatrizes causadas por cirurgias, queimaduras ou traumas.

Quais as vantagens do uso de Kelo-cote®?

Kelo-cote® atua na prevenção e na redução de cicatrizes hipertróficas e queloides, alívio do prurido e desconforto relacionados ao processo cicatricial e normalização da pigmentação da cicatriz.

Qual a composição de Kelo-cote®?

Polisiloxanos e dióxido de silicone.

Quando utilizar Kelo-cote®?

Kelo-cote® deve ser utilizado para redução de cicatrizes, quando o ferimento estiver completamente fechado ou após a remoção das suturas (pontos). Kelo-cote® também pode ser utilizado para prevenção de formação de queloides em cirurgias, traumas e queimaduras.

Quem pode utilizar Kelo-cote®?

Crianças e adultos, mesmo com pele sensível.

Como utilizar Kelo-cote®?

Limpar a área a ser tratada com água e sabão neutro, secando-a em seguida. Aplicar uma camada fina de Kelo-cote®, cobrindo toda a área afetada, duas vezes por dia.

Deixar secar por 4 a 5 minutos. Evitar o contato com roupas ou cosméticos até que ocorra a completa secagem do produto, de modo a evitar manchas.

Caso ainda sejam observados resíduos de Kelo-cote® após o tempo de secagem recomendado, retirar o excesso, e deixar o restante secar na pele normalmente.

Não é necessário massagear o local após a aplicação de Kelo-cote®.

Por quanto tempo deve-se utilizar Kelo-cote®?

Recomenda-se a utilização mínima por dois meses. Benefícios adicionais podem ser atingidos com o uso prolongado do produto.

Quais as precauções para utilização de Kelo-cote®?

Não utilizar em feridas abertas ou incisões recentes.

Não aplicar em mucosas (nariz, boca ou perto dos olhos).

Não aplicar sobre a mesma área após utilização de antibióticos tópicos ou outros produtos para a pele.

Não utilizar em caso de solução de continuidade da pele.

Quais os efeitos indesejados de Kelo-cote®?

Raramente ocorre vermelhidão, dor ou irritação na pele. Caso ocorra, consulte seu médico.

Como Kelo-cote® deve ser armazenado?

Manter fora do alcance de crianças e em temperatura inferior a 25°C.

Registro ANVISA nº: 80070490001

Farm. Resp.: Dra. Marcia Weiss I. Campos - CRF-RJ nº 4499

Fabricado e Embalado por:

ABT Advanced Bio-Technologies, Inc. Suwanee, Georgia, USA.

Patente nº U.S.: 5,741,509

Importado e Distribuído por:

FQM

FARMOQUÍMICA S/A

Rua Viúva Cláudio, 300

Rio de Janeiro - RJ

CNPJ: 33.349.473/0003-10

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Número de lote, data de fabricação e prazo de validade: vide cartucho.



KCCBRPI-5