

Para mais informações, visite nosso site:
www.ginocanesten.com.br

Fabricado por:

Rolf Kullgren AB, Ågatan 4, 646 30 - Gnesta - Suécia

Importado por: Bayer SA

Rua Domingos Jorge, 1100 - Socorro - 04761-000 - São Paulo - SP, Brasil.

CNPJ: 18.459.628/0001-15

Responsável Técnica: Erika F. Maellaro R. - CRF-SP nº 47983.

Número de Registro ANVISA: 80384380070

SAC: 0800 7231010 - sac@bayer.com

www.bayer.com.br

© 2014 Bayer S.A.. Todos os direitos reservados.



34166-01

Bayer

Gino-Canesten® Balance



Vaginose Bacteriana

Tratamento Vaginal em Gel

Uso tópico intravaginal.

O Gino-Canesten® Balance é destinado ao tratamento dos sintomas da Vaginose Bacteriana, restaurando o pH normal e a flora vaginal, conforme mostrado na tabela abaixo:

Tratamento	
Para o alívio efetivo de odor desagradável, corrimento anormal e desconforto vaginal causado pela vaginose bacteriana	Use 1 bisnaga por dia, durante 7 dias.

Ingredientes:

Água purificada, propilenoglicol, ácido láctico, metil hidroxipropil celulose, hidróxido de sódio e glicogênio.
Não contém conservantes. Livre de hormônio.

Conteúdo:

7 bisnagas aplicadoras convenientes e higiênicas com a dose certa (5 mL). Uso único. Uso tópico intravaginal.

Indicações:

Gino-Canesten® Balance é indicado para o tratamento dos sintomas da vaginose bacteriana (cujos sintomas podem incluir odor desagradável, corrimento anormal e desconforto vaginal).

O Gino-Canesten® Balance combate o odor desagradável, corrimento anormal e desconforto vaginal e restaura o pH a um nível normal.

Modo de uso:

Rode e retire a ponta da bisnaga, sente-se ou deite-se numa posição confortável e insira profundamente na vagina. Aperte gentilmente a bisnaga para liberar o seu conteúdo. Mantendo a bisnaga apertada com os dedos retire-a e descarte-a. É recomendado o uso do Gino-Canesten® Balance antes de dormir, pode ser útil utilizar um absorvente íntimo pois é comum que ocorra vazamento, mas isso não significa que o tratamento não funcionou.

Contraindicações:

Não há contraindicações para este produto, é seguro para uso durante a menstruação ou gravidez.

Advertências e precauções:

- O Gino-Canesten® Balance não deve ser usado ao tentar engravidar, pois o gel possui um pH baixo, o que pode tornar o ambiente menos adequado para os espermatozoides
- Gino-Canesten® Balance não deve ser usado como contraceptivo
- Não use se a bisnaga aplicadora estiver danificada
- Não use a bisnaga se o prazo de validade tiver expirado
- Mantenha fora do alcance de crianças
- Não utilizar caso você tenha alergia conhecida de algum dos componentes da formulação. Contém glicogênio de marisco (ostra)
- Não se destina ao uso em crianças
- Não utilizar em conjunto com preservativos de látex não lubrificados Trojan ENZ, preservativos de látex não lubrificados ATLAS e preservativos lubrificados com poliuretano Trojan Supra BareSkin

Não foram gerados dados de teste sobre a compatibilidade do Gino-Canesten® Balance com preservativos femininos, diafragma ou com qualquer outro dispositivo médico/medicamento que possa estar presente na vagina durante o uso do gel. Com base na avaliação de risco e dados de pós comercialização conclui-se que o produto pode

ser usado em conjunto com preservativos e contraceptivos intrauterinos.

Complicações/ eventos adversos:

- Possibilidade de ocorrência de sangramento vaginal, sensação de queimadura, inchaço, dor e coceira.

As usuárias são aconselhadas a entrar em contato com seu médico nas seguintes circunstâncias:

- Piora de sintomas
- Dor
- Se o desconforto não cessar
- Secreção manchada de sangue
- Corrimento que ocorra durante a menopausa
- Suspeita de infecção vaginal durante a gravidez
- Se o uso deste produto não aliviar os sintomas

Armazenamento e Transporte

- Armazenar e transportar o produto entre 2 - 30°C.

RESTRICTED